

ahc - SorbActive

Activated Charcoal Super Absorbent Dressing Instruction for Use / Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

ahc - SorbActive ist ein saugfähiger Verband für das Exsudatmanagement und zur Reduzierung von Wundgeruch. Die mehrschichtige Struktur macht ihn ideal für mäßig bis stark exsudierende Wunden. Die hydrophile Wundkontaktschicht leitet Flüssigkeit nach oben weiter, und die Verteilungsschicht mit schneller Flüssigkeitsaufnahme verteilt sich gleichmäßig nach oben in die absorbierende Schicht; der zentrale absorbierende Kern enthält SAP-Polymer, das eine hervorragende Absorption und Retention bewirkt; die Aktivkohleschicht absorbiert üble Geruchsmoleküle der Wunde durch ein physikalisches Prinzip; die flüssigkeitsabweisende Rückschicht/Wäscheschutz minimiert das Durchschlagen von Exsudat, und ihre dampfdurchlässigen Eigenschaften verbessern die Atmungsaktivität und die Fähigkeit des Exsudatmanagements.

Verwendungszweck

Activated Charcoal Super Absorbent Dressing ist ein saugstarker Wundverband für das Exsudatmanagement und die Reduzierung von üblen Gerüchen. Er kann für übelriechende Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation verwendet werden.

Indikationen

Activated Charcoal Super Absorbent Dressing ist ein Wundverband, der für mäßige bis starke Exsudation bei chronischen und akuten Wunden geeignet ist.

Kontraindikationen

1. Trockene Wunden, da dies zu einer Stagnation der Wundheilung oder zum Verkleben des Verbandes mit dem Wundbett führen kann.
2. Nicht in Hohlräumen verwenden, da sich der saugfähige Kern bei der Aufnahme von Flüssigkeit ausdehnt.
3. Nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen das Produkt selbst oder seine Bestandteile anwenden.

Vorgesehener Benutzer

Das Produkt muss von einer medizinischen Fachkraft oder unter deren Aufsicht verwendet werden.

Vorgesehener Patient

Patienten mit chronischen und akuten und/oder übelriechenden Wunden.

Klinischer Nutzen

Für die Wundbehandlung: Verringerung von üblen Gerüchen.

Unerwünschte Reaktionen

ahc - SorbActive ist sehr gut verträglich. Nach Auswertung der klinischen Daten und der Daten nach dem Inverkehrbringen wurden sehr selten die folgenden Situationen festgestellt. In sehr seltenen Fällen kann folgendes auftreten:

1. Mechanische Hautläsionen
2. Hautausschläge/Rötungen
3. Juckreiz
4. Blasenbildung

Anwendung



Erster Schritt

Wählen Sie die Größe des Verbandes so, dass er mindestens 2-3 cm über die Wund hinausgeht.

Zweiter Schritt

Legen Sie den Verband vorsichtig mit der Aktivkohleschicht auf das Wundbett / die Wundoberfläche. Die blaue Seite der Unterlage müssen Sie sehen können, d.h. sie befindet sich auf der wundabgewandten Seite.

Dritter Schritt

Der Verband wird mit einem geeigneten Sekundärverband, z.B. einer Binde oder einem Pflaster, fixiert.

Hinweis

Der Verband kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben, die Tragedauer sollte jedoch von der Menge des Exsudats abhängen. Aufgrund der hohen Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit von ahc - SorbActive kann der Verband Druck auf die Wunde ausüben, so dass er gewechselt werden muss. Es wird empfohlen, den Bereich um die Wunde und den Verband regelmäßig,

am besten täglich, zu inspizieren. Achten Sie darauf, die Wunde richtig abzudecken, d. h. eine Größe zu wählen, die groß genug ist, um die gesamte Wunde zu bedecken. Bei sehr starker Exsudation empfiehlt es sich, eine größere Wundauflage zu wählen, als zur Abdeckung der Wundfläche tatsächlich erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass ein guter Kontakt zwischen Wundauflage und Wundbett besteht.

Vorsichtsmaßnahmen / Warnungen

1. Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung führt zu Kreuzkontaminationen.
2. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.
3. Nicht erneut sterilisieren.
4. Überprüfen Sie die Wunde vor der Anwendung auf Anzeichen einer Infektion und wenden Sie sich bei Anzeichen einer Infektion an eine medizinische Fachkraft.
5. Zerschneiden Sie den Verband nicht.

Lager- und Transportbedingungen

Das Produkt ist im Lager unter normalen Raumbedingungen zu lagern. Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Raumes sind nicht genau festgelegt, aber er muss kühl und trocken sein. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den lokalen Umwelt- und Entsorgungsvorschriften erfolgen.

Weitere Informationen

Wenn ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetreten ist, melden Sie ihn bitte umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Vertrieben durch:

AKANNI Healthcare GmbH
Germany-97346 Iphofen, Krassolzheimer Straße 47
Phone +49 (0)9326-97898-50
Fax +49 (0)9326-97898-51
Mail: info@akanni.de

Importeur:

Raguse Gesellschaft für medizinische Produkte mbH
Germany-59387 Ascheberg-Herbern, Südfeld 6

Hersteller:

Winner Medical Co, Ltd.

Adresse: Winner Industrial Park, Nr. 660 Bulong Road

Longhua New District, Shenzhen, China

Europäischer Vertretung:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Adresse: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Bedeutung der verwendeten Symbole:



Nicht wiederverwenden



Durch Ethylenoxid sterilisiert



Nicht erneut sterilisieren



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Haltbarkeitsdatum



Hersteller



Chargennummer



CE-Kennzeichnung mit der ID der benannten Stelle



Katalogsnummer



Zugelassener Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft



Warnhinweise



Gebrauchsanweisung beachten



Datum der Herstellung



Sterilbarriere-System



Medical device



Importeur



Vor Sonneneinstrahlung schützen



Einmalige Produktkennung (Unique device Identifier)



Vor Nässe schützen, trocken aufbewahren



oben /This way up